

Преимущества

Проверка на наркотики — простой отбор проб

Тест на наркотики Dräger DrugCheck 3000 состоит из двух компонентов: устройство отбора образцов с помощью абсорбента для забора слюны и тест-кассета для проведения анализа. Кассета содержит буферную жидкость и окошко с двумя тест-полосками: полосой контроля и полосой результата. Тест на наркотики проводится в три этапа: возьмите образец слюны, встряхните тест-комплект подождите в течение короткого инкубационного периода и начните испытание. Абсорбирующий элемент пробоотборника обесцвечивается, как только впитается необходимое количество слюны.

После появления в окошке контрольных полос можно считывать результат. В случае отрицательного результата теста, полоска появится около соответствующего наркотика. Это означает, что в образце не содержится данный наркотик. Если около одного из веществ полоска не появилась, значит результат теста - положительный.

Быстрый и чувствительный анализ на наркотики

Dräger DrugCheck 3000 позволяет проводить проверку на присутствие до шести классов веществ: кокаин, опиаты, амфетамин, метамфетамины / «дизайнерские» наркотики (например Ecstasy, MDMA), бензодиазепины (например в рецептурных препаратах) и каннабиноиды (ТГК). Среди перечисленных классов веществ каннабиноиды употребляются чаще всего, а их наличие сложнее всего выявить (ТГК или ТНС = дельта-9-тетрагидроканнабинол). Именно поэтому Dräger DrugCheck 3000 был оптимизирован для обнаружения ТГК и имеет два режима измерения: в зависимости от выбранного времени ожидания теста возможен быстрый режим с более высоким порогом определения ТГК и чувствительный режим с более низким. Тест на наркотики занимает всего 3–5 минут.

Быстрое и точное обнаружение наркотических веществ

Благодаря компактности DrugCheck 3000 можно носить с собой. Малое время подготовки к работе делает прибор идеальным и универсальным инструментом для проведения проверок на дорогах и на рабочих местах.* Тест-комплект не содержит электрических компонентов и безопасен при использовании в опасных зонах и даже по месту лечения (РОСТ).

Дополнительные преимущества

Компания Dräger десятилетиями занимается разработкой оборудования для обнаружения алкоголя и наркотических веществ. При разработке DrugCheck 3000 компания Dräger применила принципы анализа, которые используются в системе DrugTest 5000 и доказали свою эффективность при обнаружении даже незначительных следов каннабиноидов.

Приложение Dräger DrugCheck®: обнаружение наркотиков стало еще удобнее и эффективнее


Сканирование, проверка и запись данных: регистрация данных с помощью смартфона — это очень просто. Новое приложение Dräger DrugCheck® позволяет сканировать, анализировать, регистрировать

Преимущества

и архивировать результаты тестов всего в несколько шагов. Встроенные видео-инструкции покажут вам как работать с DrugCheck 3000, например, как анализировать результаты тестов с помощью камеры смартфона, как сохранить результат для дальнейшего использования. Помимо результатов теста в приложение можно внести персональные данные испытуемого и тестера, дату, время и место проведения. Поэтому к отчетам о проверках можно вернуться спустя некоторое время. Зашифрованные данные можно переслать с помощью смартфона. Это позволяет даже удаленно давать рекомендации для принятия мер на основе результатов проверки. В информационном разделе подробно описано, как проводить тест на наркотики с помощью DrugCheck 3000. Приложение DrugCheck для операционных систем iOS и Android можно бесплатно скачать в App Store и в Google Play Store. Обратите внимание на информацию о совместимости приложения с вашим мобильным устройством.

*Одноразовые тест-комплекты DrugCheck 3000 гигиеничны в использовании и исключают фальсификацию.

Подробная информация

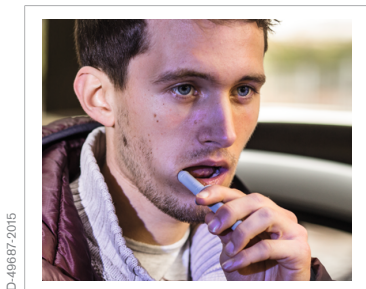

1. Возьмите пробу слюны с помощью пробоотборника



2. Вставьте пробоотборник в отверстие воронки



3. Встряхните тестовый комплект

Подробная информация



D-15447-2017

4. Запустите анализ



D-15442-2017

5. Оцените результаты теста



D-27985-2017

6. Используйте для более эффективного обнаружения наркотиков приложение Dräger DrugCheck®

Сервисные услуги



qr_code.indd

[Приложение Dräger DrugCheck® в App Store / Google Play Store](#)

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу загрузки приложения Dräger DrugCheck® в App Store / Google Play Store.

Однородные продукты

D-54720-2012



Dräger DrugTest® 5000

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest® 5000. Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.

D-6296-2009



Dräger SSK 5000

Система пробоотбора Dräger SSK 5000 идеальна для проверки на наркотики с поверхностей, работает быстро и проста в эксплуатации. При использовании с Dräger DrugTest® 5000 образец может быть перенесен в тест-кассету и проанализирован на возможное присутствие наркотиков. Образец можно также хранить и транспортировать для дальнейшего тестирования.

ST-13226-2007



Dräger DCD 5000

Простое, быстрое и надежное обнаружение алкоголя и наркотиков: Комплект для сбора слюны Dräger DCD 5000 обеспечивает простой отбор ротовой жидкости, её хранение и дальнейшую отправку в лабораторию для анализа, исключая при этом фальсификацию.

D-15278-2017



Dräger SCK

Для обеспечения порядка передачи и хранения используйте комплект с устройством отбора слюны для последующего лабораторного анализа одного образца, включая материал для транспортировки.

Технические характеристики

Тестер для выявления наркотических веществ в слюне

Размеры (Ш x В x Г)	32 x 111 x 57 мм
Масса	< 30 г
Условия применения	Эксплуатация: 5...40 °С, относительная влажность 5–95 %
Хранение / Транспортировка	4...25 °С
Время измерения	Быстрое измерение: анализ < 3 мин. Чувствительное измерение: анализ < 5 мин.
Выбор режима измерения	В зависимости от выбранного времени предварительной инкубации и требуемого предела обнаружения ТГК или более быстрого получения показаний.

Спецификация заказа

Dräger DrugCheck 3000	Описание	Код заказа
Тестер для выявления наркотических веществ в слюне		
Dräger DrugCheck 3000 STK 5	В упаковке 20 комплектов	83 25 580
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 определяет следующие типы наркотиков:		
<ul style="list-style-type: none"> – Кокаин (COC) – Опиаты (OPI) – Каннабиноиды (THC) – Амфетамины (AMP) – Метамфетамины (MET) 		
Dräger DrugCheck 3000 STK 6	В упаковке 20 комплектов	83 27 960
Dräger DrugCheck 3000 STK 6 определяет следующие типы наркотиков:		
<ul style="list-style-type: none"> – Кокаин (COC) – Опиаты (OPI) – Каннабиноиды (THC) – Амфетамины (AMP) – Метамфетамины (MET) – Бензодиазепины (BZO) 		

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (812)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47